

# Mini Guide – DI Oxivir Plus

Disponível em 2x5 Litros



Detergente Desinfetante

**ACCELERATED™** Peróxido de Hidrogénio Acelerado  
HYDROGEN PEROXIDE

## Higienização de Colchões



### Utilização...

1



Aspirar o colchão com o aspirador de pó

2



Preparar a solução a uma concentração de 3,5%.  
Numa das faces do colchão, aplicar a solução com o gerador de espuma, equipado com o kit de champonização manual.

3



Esfregar as sujidades difíceis com a escova do kit de champonização.

4



Deixar atuar a solução durante 2 horas, ou, até desaparecerem completamente, os resíduos de espuma.

5



Aspirar a superfície higienizada do colchão.  
Repetir todos os passos para higienizar a outra face do colchão.

**Nota: Deixar o colchão secar ao ar, durante pelo menos, 24 horas, antes de nova utilização.**

